



# Chamber Protect

## Das MELAG Kesselreinigungsset


**Zuverlässige Reinigung und langfristiger Schutz, der Ihren Autoklaven strahlen lässt:**

Mit dem neuen MELAG Kesselreinigungsset entfernen Sie selbst für das Auge nicht sichtbare Verschmutzungen und verhindern somit hartnäckige Verfärbungen und Ablagerungen. Profitieren Sie von Chamber Protect bei der wöchentlichen Reinigung des Kessels und der Tablett:

- ✓ Kraftvoller Reiniger mit 50 fusselfreien Tüchern und 1 Mikrofasertuch
- ✓ Besonders materialschonend für Kessel und Dichtungen
- ✓ Durch umfangreiche Materialverträglichkeitstests geprüft
- ✓ Ideal abgestimmt auf alle MELAG Autoklaven und Careclave



### Sie haben die Wahl:

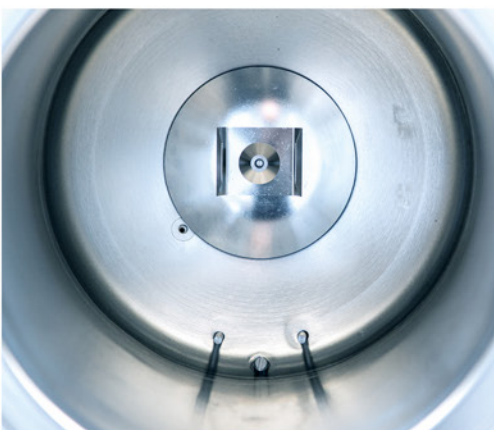

Mit regelmäßiger Anwendung  
von Chamber Protect



Ohne regelmäßige  
Kesselreinigung

# Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis

Für langfristigen Schutz und anhaltenden Glanz wenden Sie das Kesselreinigungsset bitte einmal wöchentlich wie folgt an:



## 1. Chamber Protect auftragen

Öffnen Sie die Tür Ihres Autoklaven, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen. Geben Sie anschließend ca. 2 Sprühstöße des Chamber Protect Sprays auf die Edelstahlfläche der Türinnenseite und ca. 15 Sprühstöße in die Kammer.


## 2. Chamber Protect verteilen

Bitte verteilen Sie das Reinigungsspray über die gesamten Edelstahlflächen mit einem fusselfreien Einmal-Tuch. Lassen Sie Chamber Protect für ca. 3 Minuten einwirken.



## 3. Edelstahlflächen reinigen

Nehmen sie ein weiteres fusselfreies Einmal-Tuch und befeuchten Sie dieses sowie die Innenseite des Kessels mit ausreichend demineralisiertem Wasser (je 50 ml). Wischen Sie erneut über die mit Chamber Protect besprühten Flächen und lassen Sie es für ca. 5 Minuten einwirken.

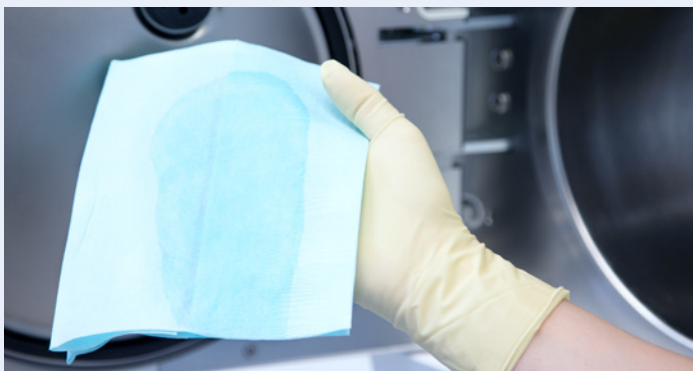

## 4. Edelstahlflächen trocknen

Abschließend trocknen Sie die Edelstahlflächen der Türinnenseite sowie des gesamten Kessels gründlich mit dem blauen Mikrofasertuch. Der Autoklav steht Ihnen nun für die Sterilisation der Instrumente wieder zur Verfügung.



Weitere Informationen finden Sie unter [www.melag.com](http://www.melag.com)

**MELAG**  
competence in hygiene